

## 食道発声上級者向け携帯用会話補助装置

### らくらく10-9/HMS39 トーク

- 皮膚伝導ヘッドセットHM39とハンズフリー拡声器のセットです。
- 食道発声の練習を重ねた方や、大きな声が出しにくい方向けの会話補助装置です。
- 音質を喉頭摘出者向けに最適化した音声帯域になっている為、聞きとりやすい拡声を実現しました。
- 小型に設計されたポータブルスピーカーで持ち運びにも便利です。



#### 【ヘッドセット仕様】

HM39をご参照下さい。

#### 【ハンズフリー拡声器仕様】

【使用電源】006P(9V)電池

【出力音圧】86dB S.P.L.(-70dBV 入力, 10cm)

【寸法】縦150mm×横200mm×厚さ40mm

【重量】240g(電池含む)

【付属品】006P(9V)電池


#### [装着方法]



①当製品はネックバンドタイプのヘッドセットです。ネックバンドを後頭部側に倒した状態で、両サイドにある耳かけ部を耳に装着して下さい。



②左耳側についている、金属製のアームの先端に、声を拾うための皮膚伝導マイクがついています。声を拾うためには皮膚伝導マイクが頬に密着する必要があります。アームはスプリングにより、マイクが頬に密着できるように可動します。

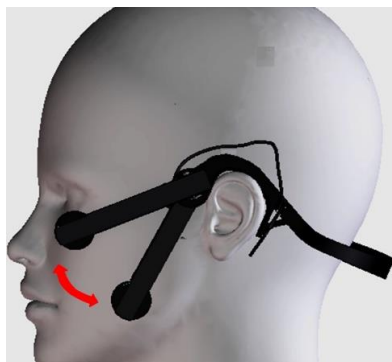

③アームは上下方向にも回転します。皮膚伝導マイクが良く声を拾う位置に触れるよう、アームの位置を調整して下さい。  
※皮膚伝導マイクは表面が擦れると、摩擦音がノイズとして発生します。位置調整の際にはマイクを肌から浮かせて調整して下さい。